

Anwendungsbereich und Wirkweise

Globalium Zeolith ist ein natürliches Medizinprodukt, das als Kationentauscher im Magen-Darm-Trakt wirkt und selektiv definierte Schadstoffe binden kann. Globalium Zeolith basiert auf einem Natur-Zeolith-Klinoptilolith, der mittels einem einzigartigen Verfahren, der PMA - Panaceo-Mikro-Aktivierung, optimiert wird (PMA-Zeolith). Die biophysikalischen Eigenschaften des Naturwirkstoffes sind dadurch beim Globalium Zeolith signifikant erhöht.

Es ist bekannt, dass unterschiedliche, insbesondere wiederkehrende physische Belastungen zu einer Störung der Darmwandfunktion (Leaky-Gut-Syndrom) führen können. Beim Leaky-Gut-Syndrom ist die Darmschleimhaut unphysiologisch durchlässig. Dadurch gelangen unerwünschte Stoffe in den Blutkreislauf. Die Darm-Wand-Barriere schützt den Körper vor unerwünschten Stoffen, die im Darmmilieu vorkommen. Ist diese Barriere gestört, steigt die Gefahr, dass Schadstoffe durch die Darmwand dringen und den Organismus schädigen. Globalium Zeolith stärkt nachgewiesenermaßen die physiologische Darmwandfunktion und damit die Schutzmauer des Körpers vor Fremdstoffen.

Unterstützend kann der Globalium Zeolith über den Kationentausch unter den Bedingungen des Darmmilieus selektiv Schwermetalle wie Pb, Cd, As, Ni, Cr sowie Ammonium durch Bindung reduzieren.

Der Globalium Zeolith wird auf natürlichem Wege vollständig über den Stuhl ausgeschieden.



Globalium Zeolith

Natur-Medizinprodukt

Globalium Zeolith

Zur **Unterstützung der Entgiftung** und der **Stärkung der Darm-Wand-Barriere** durch die Bindung von Schwermetallen (Blei, Cadmium, Arsen, Chrom, Nickel) und Ammonium im Magen-Darm-Trakt.

Qualitätsgarantie

Ständige Kontrollen garantieren die hohe Qualität und Wirksamkeit als Medizinprodukt gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG.

Zutaten

100% Zeolith (Klinoptilolith)

Ein natürliches Vulkanmineral, aufbereitet durch PMA-Technologie.

Anwendung

Nehmen Sie 2 – 3 mal täglich je einen gestrichenen Teelöffel zu den Mahlzeiten mit einem Glas Wasser (ca. 100 ml) ein.

Generalvertrieb International
Globalis – Oase der Natur
93049 Regensburg, Deutschland
www.globalis.info

GLOBALIS
Gesundheits- und Naturprodukte

200g (Pulver/Nettofüllmenge)

Sicherheitshinweise
siehe Innenseite

Sicherheitshinweise

Außer gelegentlich auftretender Obstipation (Verstopfung) sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Beachten Sie die absoluten sowie die relativen Kontraindikationen bevor Sie Globalium Zeolith einnehmen. Beenden Sie die Einnahme, wenn Sie einen unerwarteten Effekt bemerken. Absolute Kontraindikationen: Vor und nach Transplantationen. Relative Kontraindikationen (nur nach Rücksprache mit einem Arzt): Bei Verabreichung von Immunsuppressiva und Rheumatica, während Chemo- und Radiotherapie, bei vorliegender Obstipation, bei vorliegenden Krankheiten oder medikamentöser Therapie. Bei Anwendung an Kindern und Jugendlichen, sowie an schwangeren und stillenden Frauen.

Wir empfehlen eine um 1 Stunde zeitversetzte Einnahme von Globalium Zeolith mit Medikamenten, wobei Medikamente, falls nicht anders verordnet, vor dem Zeolith eingenommen werden sollten. Machen Sie nach 28 Tagen eine dreitägige Pause mit der Einnahme. Die Einnahme kann solange fortgeführt werden, solange die wiederkehrenden physischen Belastungen gegeben sind.

Überschreiten Sie nicht die angegebene Tagesdosis ohne Absprache mit Ihrem Arzt. Nicht inhalieren. Außer Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren. Das Glas nach der Verwendung immer schließen. Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

MUSTER